

Bedlingtoninterrierien DNA-tutkimus (perinnöllinen kuparitoksikoosi)

Näytteenotto-ohje geenitesti: koira (voimassa toistaiseksi)

- Ennen näytteenottoa eläimen tulee olla syömättä ja erillään muista eläimistä n. yhden tunnin ajan
- Testaukseen tarvitaan **2 kpl poskisoluharjoja/eläin/testi tai EDTA-verinäyte**. (Verinäytteen saa ottaa vain eläinlääkäri tai muu näytteenottoon asianmukaisen koulutuksen saanut ja riittävät tiedot ja taidot omaava henkilö. (HE 30/1999))
- Ota näyte pyörittelemällä harjaa noin 10 krt posken ja ikenen välissä
- Anna harjan kuivua hetki ja sulje jokainen harja omaan pakkaukseensa
- Merkitse pakkaukseen selkeästi eläimen ja omistajan nimi sekä näytteenottopäivä
- Täytä halutuista tutkimuksista **sähköinen lähete** Movetin laboratoriopalvelussa (<https://lab.movet.fi/>)
 - Lähetteellä tulee olla huomautus, että **tulos halutaan Omakoira-palveluun**
- **Tallenna näytteen tiedot Kennelliiton Omakoira-palvelussa** (<https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu>)
- Säilytä näytteet huoneenlämmössä lähetykseen asti
- Sulje näytteet Movetin lähetyslaatikkoon ja kirjoita laatikkoon omat yhteystietosi. Katso tarkemmat lähetysohjeet täältä
- **Näytteenottovälineitä ja lähetyslaatikoita** voit tilata veloituksetta tilauslomakkeellamme (<https://www.movet.fi/tilaukset-ja-palautte/>).

Ohjeita kasvattajalle/omistajalle:

Suomen Kennelliiton Omakoira -palvelu

Testituloksen tallennus

Jotta COMMD-1-geenitestitulokset saadaan tallennettua, tulee omistajan tehdä koiralle Omakoira-palvelussa ennakkoon sähköinen lähete, joka voidaan valita koiralle terveystutkimukset kohdasta.

Jos kasvattaja haluaa geenitestata rekisteröitävän pentueen tai osan sen pennuista, kasvattaja tekee pennuille sähköiset ennakkolähteet Omakoira-palvelussa sen jälkeen, kun pentueen tunnistusmerkinnät on tallennettu Omakoira-palveluun. Näytelähetteen hinta on Kennelliiton jäsenelle 3 €, muille 6 €, ja se maksetaan verkkopankissa lähetteen tilauksen yhteydessä. Tämän jälkeen koiralta otetaan virallinen DNA-näyte, jolloin näytteenottajana toimii joko Kennelliiton DNA-näytteenottaja tai eläinlääkäri. Näytteenottaja vie Omakoira-palveluun näytteenottotiedot ja valitsee laboratoriksi Movetin, jonne näytteenottaja lähettää DNA-näytteen. Laboratorio analysoi näytteen ja toimittaa tuloksen omistajalle, sekä tallentaa tuloksen koiran tietoihin, jolloin se näkyy jalostustietojärjestelmässä.

Toimi näin:

- Tee ensin lähete Omakoira-palvelussa
- Pyydä sitten eläinlääkäriä/virallista näytteenottajaa
 - **tallentamaan näytteen tiedot Omakoira-palvelussa näytteenoton yhteydessä**
 - **täyttämään näytteenottotodistus eläimen tunnistamisesta**
- Lisäksi tarvitaan aina Movetin oma lähete
 - Lähetteellä tulee olla huomautus, että **tulos halutaan Omakoira-palveluun**
- Kun tutkimustulos on valmis, Movet tallentaa tuloksen Omakoiraan veloituksetta
 - Tulokset saapuvat aina myös läheteelle merkittyihin sähköpostiosoitteisiin.

Vinkki! Voit tulla näytteenottoon (poskisolunäyte) myös Movetille. Olemme Kennelliiton hyväksymiä näytteenottajia. Sovithan näytteenotosta etukäteen. Otamme näytteitä vain Movetille tulevia tutkimuksia varten.